

検査内容変更のお知らせ

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査内容を変更させていただいておりますので、ご案内申し上げます。
先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

➡ FDP(フィブリン分解産物)-尿

変更日:2025年4月30日(水)受付分より

裏面に続きます。

▶ FDP(フィブリン分解産物)-尿

	新	従来
検 査 項 目 名	FDP-尿	同左
検 体 必 要 量	尿(遠心後上清) 0.5mL	尿 1.0mL(畜尿不可)
容 器	FDP-尿用専用容器 → 容器番号 1	容器番号 12
検 体 の 保 存 方 法	凍結	冷蔵
所 要 日 数	5 ～ 9	3 ～ 5
検 査 方 法	LPIA法	ラテックス凝集法
基 準 値	100以下	0.1以下
単 位	ng/mL	μ g/mL
報 告 範 囲	50以下 ～ 99900000	0.1 ～ 最終値
報 告 桁 数	整数	小数第1位
備 考	新鮮尿2.0mLをFDP-尿用専用容器に注入し、よく混和後3000rpm 5～10分間遠心分離してください。 遠心後の上清0.5mLを容器番号 1に分注し、ご提出ください。 上清(尿)は必ず凍結保存してください。 容器番号 12に新鮮尿 1.0mL採取し、容器のままご提出ください。	

【FDP-尿用専用容器】



【検査方法の参考文献】

堀内伸純, 他: 臨床検査機器・試薬 14, 267～270, 1991.